

## BENUTZERINFORMATIONEN

ultraSAVER EVAC  
Evakuierungstuch

SAN-0559



Evakuierungstuch mit Gurten und Eckgummis



Einsatzbereich:

- Krankenhäuser, Pflegeheime
- Evakuierung bettlägeriger oder verletzter Personen



1,4 kg



2000 x 900 mm




max. 400 kg

### Bedienungshinweise


#### Allgemeine Sicherheitshinweise

Das ultraSAVER EVAC kann mehrmals verwendet werden. Prüfen Sie vor und nach jeder Anwendung das Evakuierungstuch auf Unversehrtheit. Sollten Beschädigungen oder nur der Verdacht auf Beschädigungen auftreten, nehmen Sie das Produkt sofort außer Betrieb.

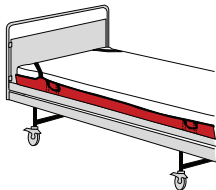

#### Vorbereitung

Das ultraSAVER EVAC wird unter der Matratze positioniert und mit den Eckgummis an den Ecken der Matratze befestigt. Danach kann wie gewohnt ein Bettlaken auf die Matratze gezogen werden. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die Gurte gut für das Pflegepersonal zu erreichen sind. Die Gurte zur Fixierung der bettlägerigen Person können in den Taschen verstaut werden.

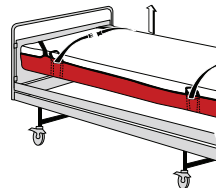

#### Evakuierung

Fixieren Sie die bettlägerige Person mit den beiden Fixiergurten, die in den Taschen verstaut sind. Achten Sie darauf, dass die Fixiergurte fest anliegen, aber nicht einschneiden. Heben Sie das Evakuierungstuch samt Matratze behutsam, mit dem Kopfende zuerst, aus dem Bett.

#### Pflegehinweise

Das Evakuierungstuch ist für die Sprüh- und die Wischdesinfektion geeignet.

